

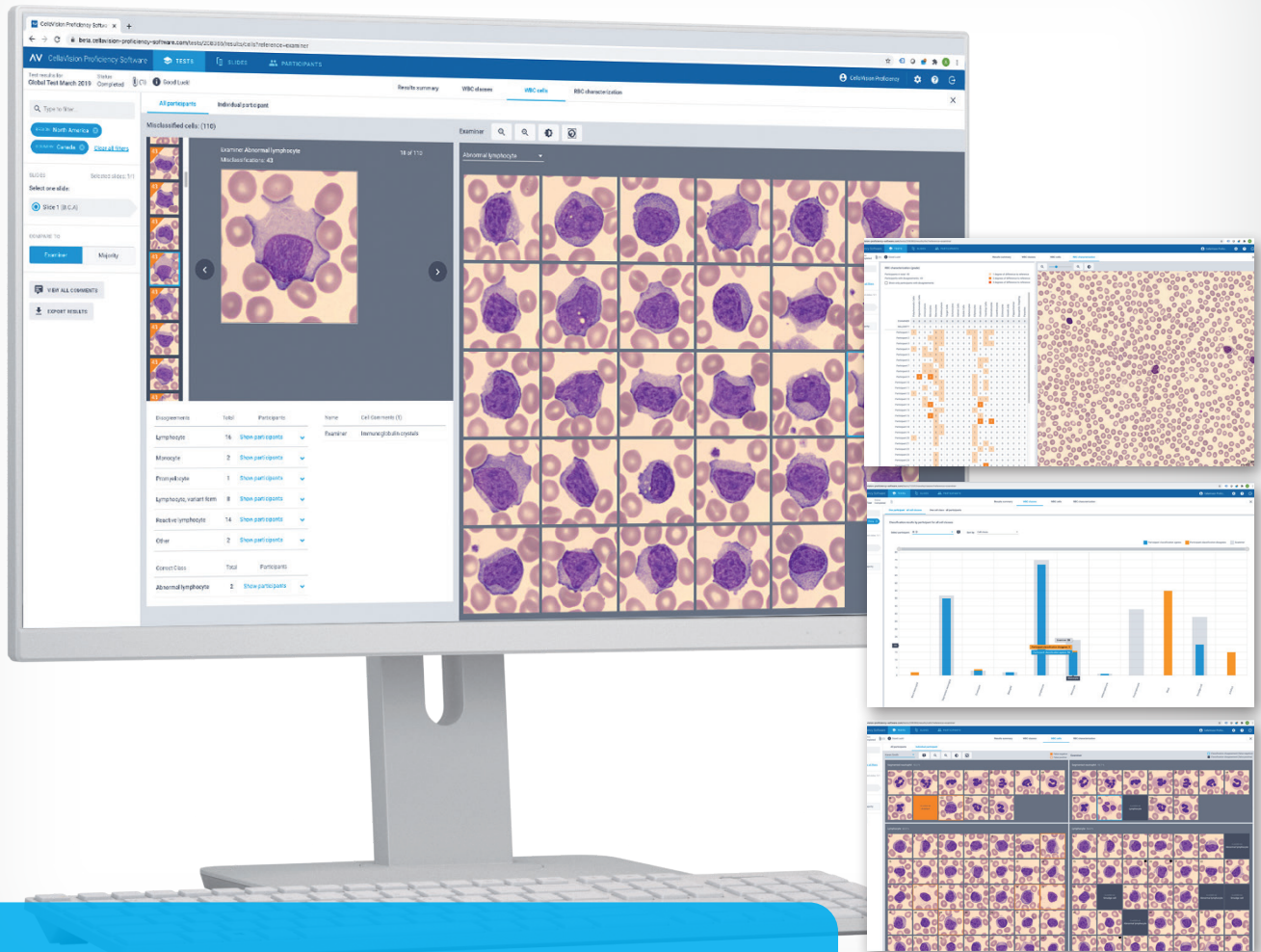


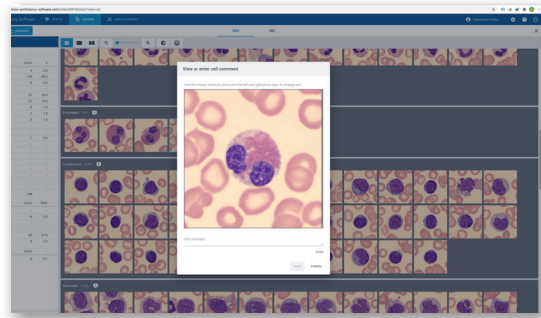

CellaVision® Proficiency Software

Die CellaVision Proficiency Software ist ein innovatives Programm, mit dem Labormanager die Mitarbeiterkompetenz im Bereich der Zellmorphologie beurteilen, überwachen und fördern können. Das webgestützte Tool erleichtert die Einrichtung eines strukturierten und wirksamen Prozesses zur Beurteilung der Fähigkeiten und Förderung der Kompetenz, ohne zu viel Zeit und Ressourcen zu binden.

Die CellaVision Proficiency Software kann alleine oder in Kombination mit Hardware und unterstützenden Anwendungen von CellaVision eingesetzt werden und dient als Plattform für die Weiterbildung der Mitarbeiter und ermöglicht genauere und stärker standardisierte Untersuchungsergebnisse.

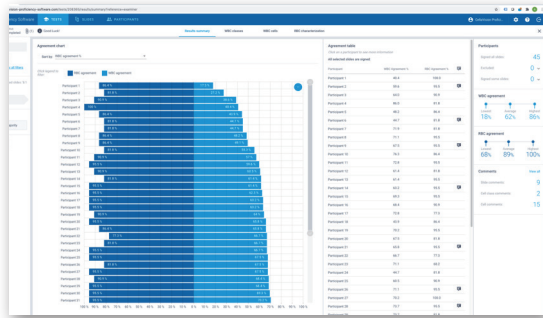

Wie funktioniert die Software?

- Die Software wurde dafür konzipiert, die Fähigkeiten der Mitarbeiter bei der Durchführung von Zelldifferenzierungen an Blut und Körperflüssigkeiten zu beurteilen.
- Der Zugriff auf das webgestützte Tool ist von jedem Computer mit Internetverbindung aus über einen sicheren Zugang mit personalisierten Benutzerkonten möglich.
- Der Prüfer kann Testszenarien erstellen, indem er digitale Objektträger hochlädt, entweder aus der eigenen CellaVision DM Datenbank oder aus einer von CellaVision bereitgestellten Bibliothek digitaler Objektträger.
- Wenn ein neuer Test verfügbar ist, werden die Teilnehmer automatisch benachrichtigt und aufgefordert, Differenzierungen an einem oder mehreren Objektträgern durchzuführen.
- Nach Abschluss des Tests können die Teilnehmer ihre Ergebnisse einsehen und ihre eigenen Differenzierungen mit denen des Prüfers und der anderen Teilnehmer vergleichen.
- Der Prüfer erhält automatisch einen Leistungsbericht, in dem Bereiche für künftige Schulung und Kompetenzentwicklung hervorgehoben sind.

Welche Vorteile hat die CellaVision Proficiency Software?

- Das Tool eignet sich für Labore jeder Größe.
- Der Inhalt kann an die festgestellten Kompetenzdefizite oder an speziellen Schulungsbedarf angepasst werden.
- Tests lassen sich schnell und einfach erstellen und verwalten.
- Die Tests sind für die Teilnehmer schnell und einfach aufzurufen und zu absolvieren.
- Die Ergebnisse werden automatisch zusammengestellt.
- Frühere Tests können problemlos eingesehen werden, um den Fortschritt der Teilnehmer zu ermitteln.

FUNKTIONEN

Webgestützt, per Browser von überall aus zugänglich

Integrierte Funktion zur Benachrichtigung der Teilnehmer

Automatische Berichterstellung für den Prüfer

Automatische Rückmeldung an die Teilnehmer

CellaVision® Proficiency Software

TECHNISCHE DATEN

EMPFOHLENE PC-MINDESTANFORDERUNGEN

- Browser: Aktuelle Version des Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium based), Mozilla Firefox, Apple Safari
- 2 GB RAM
- 8 Mbit/s Bandbreite
- Bildschirmauflösung 1920 × 1080

ABHÄNGIGKEITEN

Transfer Tool (kann nur mit CellaVision Remote Review Software ab Version 4.0 verwendet werden)

LIZENZEN

Es gibt verschiedene Lizenzoptionen:

- 10, 30, 50, 70 oder 100 Benutzer
- 3 oder 7 Jahre

Änderungen vorbehalten. Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.