
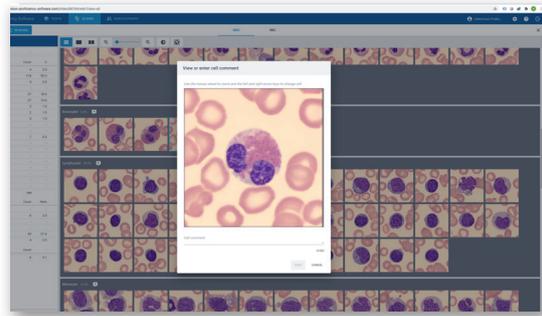


## CellaVision® Proficiency Software

CellaVision Proficiency es una herramienta innovadora diseñada para ayudar a los gerentes de laboratorio en las tareas de asesoría, monitoreo y mejora de las capacidades del personal en el área de la morfología celular. Esta herramienta web facilita la configuración de un proceso estructurado y eficaz para la evaluación especializada y la mejora de las capacidades sin necesidad de invertir mucho tiempo, esfuerzo o recursos.

Al ponerlo en práctica de forma independiente o junto con el hardware CellaVision y las aplicaciones compatibles, CellaVision Proficiency Software actúa como una plataforma para la mejora de las capacidades del personal en el área de la morfología celular, propiciando así las iniciativas y el trabajo que permiten ofrecer resultados más exactos y estandarizados.

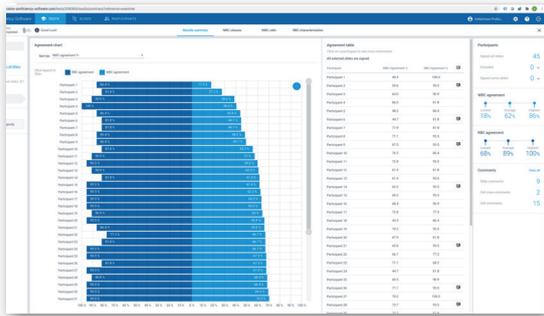

## ¿Cómo funciona?

- El software está diseñado para evaluar la capacidad del personal técnico en torno al desarrollo de los diferenciales de sangre y fluidos corporales.
- El acceso a la herramienta web está asegurado desde cualquier computadora conectada a Internet mediante inicios de sesión seguros y cuentas de usuario personalizadas.
- El examinador puede crear escenarios de prueba cargando portaobjetos digitales desde la base de datos de CellaVision DM o bien desde una biblioteca de portaobjetos digitales suministrada por CellaVision.
- A los participantes se les notifica de forma automática cuando una nueva prueba está disponible y se les indica que pueden realizar los diferenciales en uno o más portaobjetos digitales.
- Una vez que la prueba se haya concluido, los participantes pueden consultar su resultado, comparar el diferencial con el del examinador y los de sus demás compañeros.
- El examinador obtiene de forma automática un informe de desempeño que destaca las áreas que requieran de un proceso de mayor capacitación o de un mejor desarrollo de capacidades.

## ¿Cuáles son las ventajas de CellaVision Proficiency Software?

- Es ideal para organizaciones de cualquier tamaño.
- Puede personalizarse para explorar las faltas de competencia identificadas o satisfacer tanto necesidades como objetivos particulares de capacitación.
- Las pruebas son rápidas y fáciles de crear y gestionar.
- Los participantes obtienen acceso y pueden completar las pruebas, todo de forma rápida y fácil.
- Los resultados se recopilan de forma automática.
- Es fácil volver a consultar las pruebas a fin de darle seguimiento al avance de los participantes.

## CARACTERÍSTICAS

Herramienta web con acceso instantáneo al navegador desde cualquier parte

Herramienta web con acceso instantáneo al navegador desde cualquier parte

Generación de informes automatizada para el examinador

Comentarios automatizados para los participantes

## CellaVision® Proficiency Software

### FICHA TÉCNICA

#### ESPECIFICACIONES DE PC RECOMENDADAS

- Navegador: la versión más reciente de Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium based), Mozilla Firefox, Apple Safari
- 2 GB RAM
- 8 Mbps de ancho de banda
- Resolución de pantalla 1.920 × 1.080

#### DEPENDENCIAS

Transfer Tool (solo puede utilizarse con CellaVision Remote Review Software versión 4.0 o posterior)

#### LICENCIAS

Puede elegir entre diversas opciones de licencia:

- 10, 30, 50, 70 o 100 usuarios
- De 3 a 7 años

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Este producto podría no estar disponible en todos los mercados.